


Dinterdamo


Plastic Dosers

per Uso Veterinario

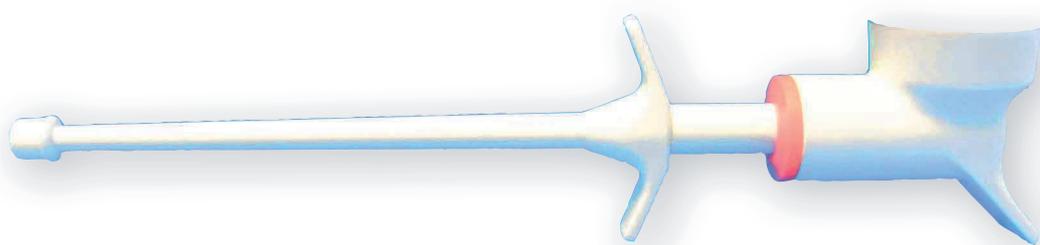

ISTRUZIONI per l'USO

Avvitare i dosatori senza stringere in modo eccessivo per evitare deformazioni.

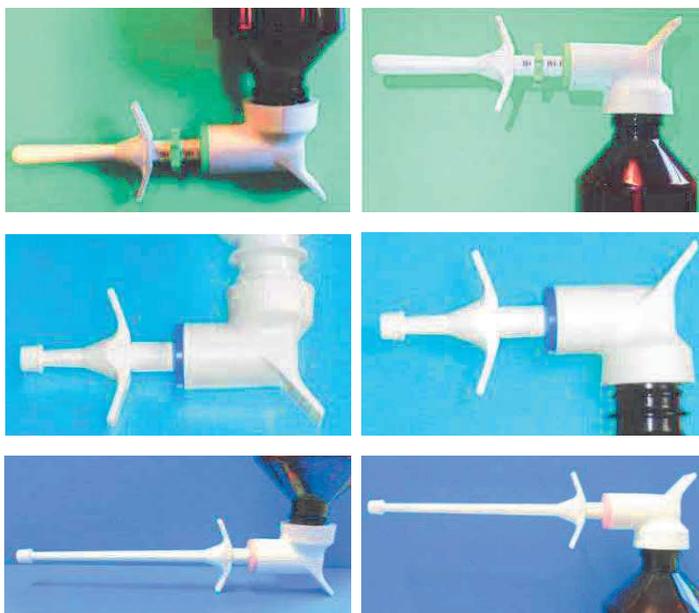

1) Prodotto viscoso:
utilizzare il flacone rovesciato



2) Prodotto liquido:
utilizzare il flacone dritto



Inserire il tubo (tagliato a misura) nel foro del Doser.

Pulizia e manutenzione

Dopo ogni utilizzo e prima di riporlo nell'apposita confezione, svuotare completamente il Doser dai residui di prodotto utilizzato e lavarlo facendo passare al suo interno dell'acqua. Conservare in luogo fresco ed asciutto e lontano da fonti di calore.

ATTENZIONE: Non trasportare i Doser montati sui flaconi.

Smaltire secondo le normative vigenti nel paese di utilizzo.

CERTIFIED QUALITY SYSTEM UNI EN ISO 9001:2015
NR. 50 100 4479 - Rev. 06